

Malaria EIA Test

Ensayo eficaz de valoración de anticuerpos contra la Malaria

- Detección amplia y sensible de varias especies
- Altamente específico para la valoración de donadores con riesgo de Malaria
- Validado completamente en la familia Evolis™ y en sistemas Elite™

Detección amplia y sensible de especies

- Cuatro antígenos recombinantes para detectar anticuerpos para *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale* y *P. malariae*
- Sensibilidad mayor a 93% con muestras de *P. falciparum*
- Sensibilidad de 100% con muestras de *P. vivax*
- Cumple con las Recomendaciones de la OMS de 2009

Altamente específico


- Especificidad mayor a 96% en 13,608 donantes con riesgo de Malaria

Validado completamente en la familia Evolis™ y los sistemas Elite™

- Códigos de color y procedimiento optimizado
- Reactivos con código de barras y listos para usar.

Formato de la prueba

1

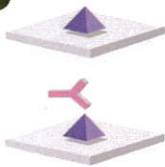

- Placa recubierta con antígenos recombinantes
- Dosificar 50 µl de controles y muestras
- Incubar por 30 minutos a 37 °C

Prueba de dispensado

Color del pozo ANTES de la dosificación

Color del pozo DESPUÉS de la dosificación



LAVADO

2




- Dosificar 50 µl del conjugado diluido
- Incubar por 30 minutos a 37 °C



LAVADO

3

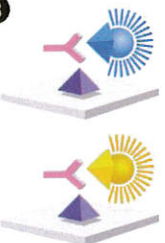

- Dosificar 50 µl del sustrato TMB
- Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente (18-30 °C) en la oscuridad
- Dosificar 50 µl de solución de paro
- Corte = Media de control negativo + 0.100



Lectura en la longitud de onda doble 450/620-690 nm

P. falciparum y *P. vivax* rAg

P. falciparum, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* Ac de muestras

rAg conjugado a peroxidasa de rábano picante

Información de pedido

Núm. de catálogo

Descripción

72526

Malaria EIA*

96 pruebas

72528

Malaria EIA*

480 pruebas

* Pregunte por la disponibilidad en su país



Bio-Rad, S.N.C. con capital de 50.000.00€, Locataire - Gérant, 449 990 712 RCS Natoire • Núm. Intracomunitario FR 62 449 990 712 • Siret 449 990 712 00019

BIO-RAD

Bio-Rad Laboratories

Para información adicional, sírvase contactar a la oficina Bio-Rad más cercana o visite nuestro portal en www.bio-rad.com/diagnostics

Grupo de Diagnóstico Clínico



Portal www.bio-rad.com/diagnostics EE.UU. 1-800-2BIO-RAD Australia 61-2-9914-2800 Austria 43-1-877-8901 Bélgica 32-9-385-5511 Brasil 5521-3237-9400 Canadá 1-514-334-4372 China 86-21-64260808 República Checa 420-241-430-532 Dinamarca +45-4452-1000 Finlandia 358-9-804-22-00 Francia 33-1-47-95-60-00 Alemania +49-(0)89-318-840 Grecia 30-210-7774396 Hong Kong 852-2789-3300 Hungría +36-1-459-6100 India 1-800-180-1224 Israel 972-3-9636050 Italia +39-02-216091 Japón 81-3-6361-7070 Corea 82-2-3473-4466 México +52 (55) 5488-7670 Países Bajos +31-318-540666 Nueva Zelanda 64-9-415-2280 Noruega 47-23-38-41-30 Polonia 48-22-3319999 Portugal 351-21-472-7700 Rusia 7-495-721-14-04 Singapur 65-6415-3170 Sudáfrica 27-11-442-85-08 España 34-91-590-5200 Suecia 46-8-555-127-00 Suiza 41-61-717-95-55 Tailandia 662-651-8311 Reino Unido +44-(0)20-8328-2000